

Dieses Informationsblatt ist jedem aktiven Feuerwehrmitglied mit der Schutzmaske auszuhändigen !



Kreisbrandinspektion Weilheim Schongau

Hinweise zu persönlichen FFP2 Masken

Zur Bewältigung des bayernweiten Katastrophenfalls und der weltweiten Corona-Virus-Krise wird jedes aktive Feuerwehrmitglied im Landkreis Weilheim-Schongau mit einer persönlichen FFP2-Mund-Nasenschutzmaske ausgestattet.

Wenn alle Feuerwehrdienstleistenden diese Maske im Einsatz und sonstigen Feuerwehrdienst (beim Aufeinandertreffen mehrerer Personen ohne ausreichenden Abstand) tragen, kann die Gefahr einer Infektion auf ein Minimum beschränkt werden. Die FFP2-Masken haben eine Schutzklasse, die auch bei Kontakt mit einer Corona infizierten Person Schutz bietet (siehe Anforderungen RKI). Bei bekanntem direktem Kontakt mit Infizierten ist jedoch zu beachten, dass darüber hinaus weitere Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Einweganzug, Schutzhandschuhe, etc. erforderlich ist.

Persönliche Maske

Die ausgeteilte FFP2 Maske ist bis auf weiteres Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und somit als persönliche Maske zu verstehen. Da aufgrund der derzeitigen weltweit extrem hohen Nachfrage bei gleichzeitigen Produktionsausfällen eine Nachbeschaffung äußerst schwierig ist, ist die Maske soweit irgendwie vertretbar für mehrere Einsätze zu nutzen. Folgendes ist bei der Mehrfachverwendung zu achten:

- Bei bekanntem direktem Kontakt mit dem Coronavirus ist die Maske zu entsorgen. Die Maske kann dann in einer Plastiktüte über den Hausmüll entsorgt werden
- **Die Maske darf immer nur von derselben Person wiederverwendet werden.** (Masken eindeutig beschriften)
- Nach dem Absetzen sollte die Maske an der Luft getrocknet und aufbewahrt werden.
- Die Maske nicht mit Desinfektionsmittel reinigen.
- Die Innenseite der Maske sollte möglichst nicht berührt werden.
- Maske vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigung und Verunreinigung prüfen (Sichtprüfung)




Uwe Wieland
Kreisbrandmeister ABC, Gefahrgut
Kreisbrandinspektion Weilheim-Schongau


Hinweise zum An- und Ablegen der Schutzmaske




Die Ränder der Maske voneinander lösen

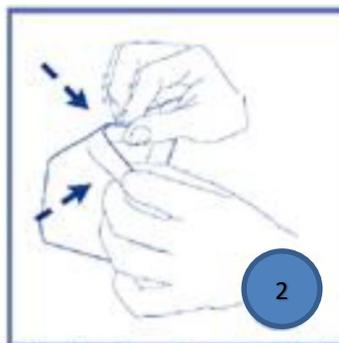

Den Nasensteg biegen, damit die Maske geöffnet bleibt.

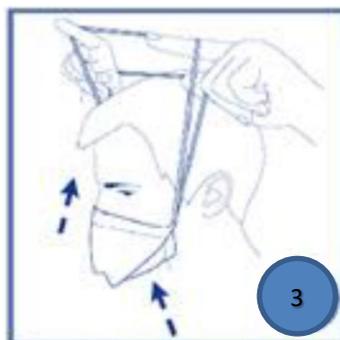

Die Maske am Kinn anlegen und die beiden Gummibädern über den Kopf führen

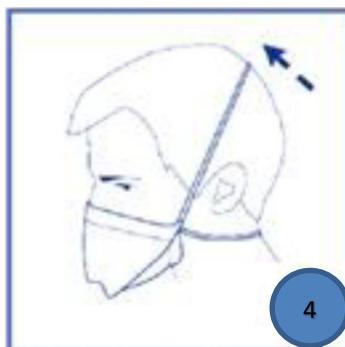

Das untere Gummiband in den Nacken legen und das obere Gummiband auf den oberen Hinterkopf legen



Den Nasensteg anpassen, in dem man ihn mit den Fingern an der Nase festdrückt.



Die Maske sollte komplett am Gesicht anliegen.

Beim Ablegen der Maske sollte die Innenseite nicht berührt werden. Beim Trocknen und Aufbewahren soll auf eine hygienische Lagerung geachtet werden.

Quellen: Auszug aus der Anleitung FFP2-Maco-Masken und Ressourcenschonung nach BAUA